

# √SOFT LIFT®

REJUVENATION & LIFTING THREADS



## חוסים נספגים לחיטוב ולעיצוב הפנים

אישור FDA אמריקאי | אישור CE אירופאי | אישור משרד הבריאות

  
OMEGAMEDIX  
THE BEAUTY OF MEDICINE



get

**YOUR**

impressive natural

**LOOK**

# V Soft Lift

## חוטמים נספגים לחיטוב ולעיצוב הפנים

עם השנים מאבד העור נפח וגמישות והרקמות התומכות נחלשות, בשלב זה מתחיל תהליך של צניחת העור, במיוחד בקו הלסת ובקו הגבה, דבר המשווה לפנים מראה מבוגר, עייף וכעוס. בכדי לתקן את הנפילה, צריך להרים את הרקמות. הפתרון לצניחה משמעותית של העור הינו ניתוח מתיחת פנים, אולם זהו הליך פולשני הכרוך בסיכון ובהחלמה ממושכת.

במצבים בהם ניתוח אינו מתאפשר או אינו הכרחי, החוטמים נותנים מענה לחיטוב ולעיצוב הפנים, במינימום סיכון וללא זמן החלמה - חזרה מיידית לשגרה. הזרקת חוטמים הינה הליך עם אפקט הרמה מידי.

### חוטמים נספגים - האפקט המשולש

- שיפור מרקם העור.
- מתיחה מכאנית של העור לחיזוק הרקמות התומכות.
- חידוש ייצור קולגן ואלסטין.

### התוצאה

- מראה עור רענן מתוח וצעיר לאורך זמן.
- חיזוק הרקמות התומכות - חיוני במיוחד לתוצאות ארוכות טווח.

ניתן לשלב טיפול זה עם כל פרוצדורה אסתטית אחרת כמו הזרקת חומרי מילוי, מזוטריפיה או טיפולי פנים עם מכשור.

**חוטי V Soft Lift** מיוצרים בשבדיה ומבוססים על מרכיב PDO (Ploydioxanone), הנמצא בשימוש בעולם הרפואה למעלה מ-20 שנה כחוט תפירה בניתוחים כירורגיים שונים. חוטי PDO הינם החוטמים הבטוחים והנפוצים ביותר בתחום הרפואה האסתטית להרמה, לעיצוב ולמיצוק העור. חוטי PDO נספגים ומתפרקים לחלוטין לאחר 6-12 חודשים, תלוי בעובי ובסוג החוט.



ללא  
זמן החלמה



ללא  
צלקות



אפקט מתיחה  
ללא ניתוח

## כיצד מתבצע הטיפול?

לאחר אלחוש מקומי מוחדר החוט אל העור באמצעות מחט. כמות וסוג החוטים יותאמו לפי מצב העור והתוצאה שנרצה להשיג. באמצעות החוט ניתן לבצע מתיחה מכאנית ולעצב את העור הרפוי והתוצאה נראית לעין מיידית. התוצאה תלך ותשתפר במהלך כחודשיים מיום הטיפול, בזכות ייצור מוגבר של קולגן ואלסטין.

לאורך זמן ישפרו החוטים את צפיפות העור שיראה מתוח, אלסטי ומוצק יותר.

במידת הצורך, ניתן לשלב תוספת נפח באמצעות חומרי מילוי.

## האם הטיפול כואב?

הטיפול מתבצע תחת אלחוש מקומי וכרוך באי נוחות קלה. במהלך הטיפול תורגש מתיחה של הרקמה ובחלוף השפעת ההרדמה תיתכן רגישות קלה שתחלוף לאחר מספר ימים.

## תוך כמה זמן אראה תוצאות?

התוצאות נראות באופן מידי ואף משתפרות בחודשים שלאחר הטיפול. התוצאה תימשך 6-12 חודשים בהתאם לסוג החוט ולכמות ועובי החוטים.

## מהן התופעות שייכתנו לאחר הטיפול?

לאחר הטיפול תיתכן נפיחות, שטפי דם ורגישות באזור המטופל, שיחלפו תוך זמן קצר.

## המלצות לאחר הטיפול

- חשוב להימנע מסאונה או כל פעילות שמגבירה הזעה, למספר ימים לאחר הטיפול.
- יש למרוח קרם הגנה מהשמש.
- יש לשטוף את הפנים בעדינות ולא לשפשף את העור.
- יש להימנע מפעילות ספורט מאומצת.
- הרופא המטפל ינחה אותך בהתאם לסוג הטיפול שבוצע ובהתאם לתוכנית הטיפול שתותאם לך אישית.

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

# BEFORE & AFTER





## להחזיר את מראה הפנים והצוואר שנים לאחור

- הדגשת קו לסת
  - הדגשת עצמות הלחיים
  - חיטוב קווי המתאר של הפנים
  - הרמת גבות ועפעפיים נפולים
  - שיפור מרקם עור הפנים והצוואר
  - הידוק רפיון עור הצוואר
  - הרמת עודף עור בסנטר
-

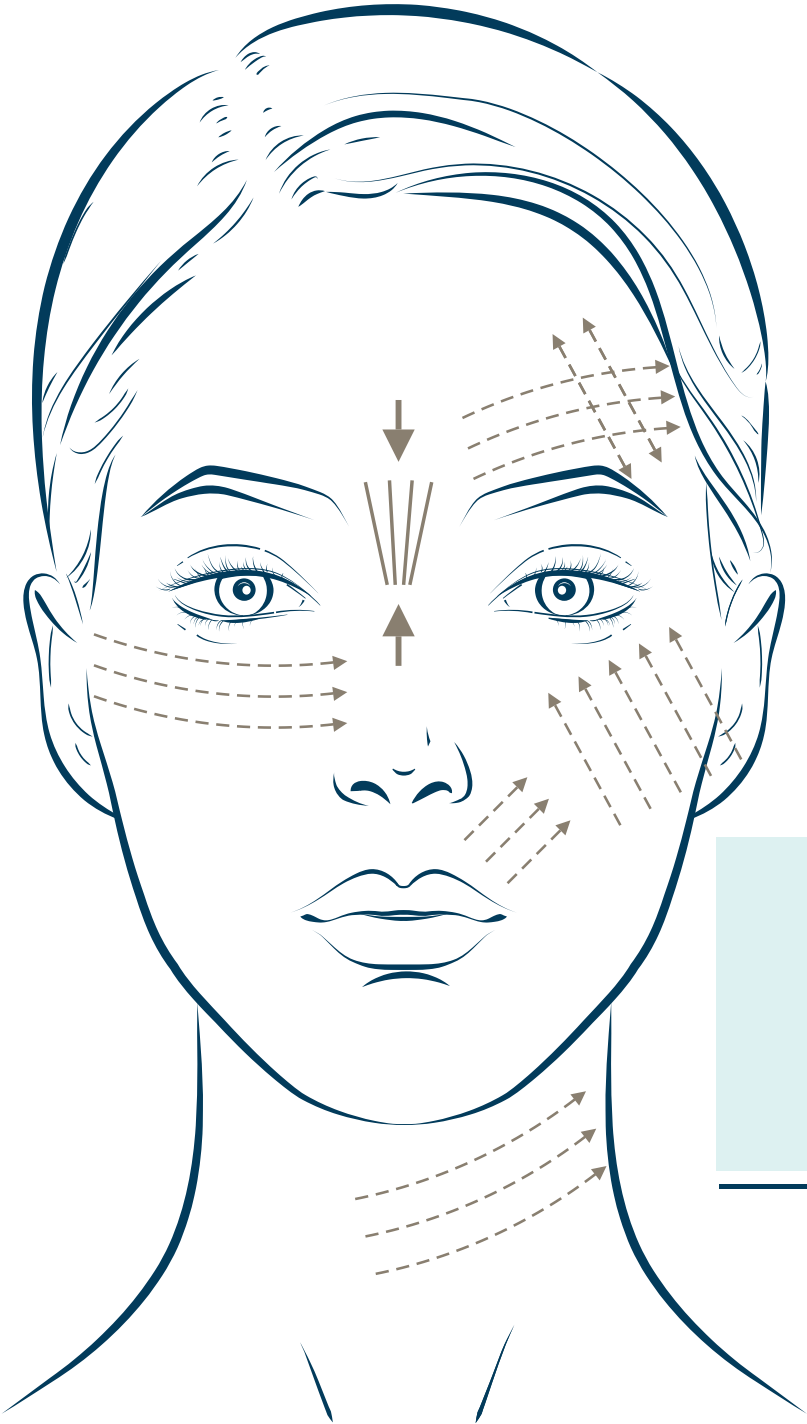

*V***SOFT LIFT**<sup>®</sup>  
REJUVENATION & LIFTING THREADS

  
**OMEGAMEDIX**  
THE BEAUTY OF MEDICINE

 Omegamedix.israel

רח' בזל 25, פתח תקוה | 03-7589090 | [www.omegamedix.co.il](http://www.omegamedix.co.il)